

## VIO COPY TOOL 2.X: INSTALLATION UND UPDATE

Mit dieser Software ist es möglich, Programme und Setup-Einstellungen eines VIO D/S -Gerätes der Version 2.x.x zu archivieren und auf ein anderes VIO-Gerät der Version 2.x.x zu übertragen. Es können auch „offline“ Programme erstellt werden, die dann auf ein VIO D/S -Gerät der Version 2.x.x übertragen werden können.

### Systemvoraussetzungen

Windows 10, Windows 7, Windows XP (32 und 64bit)

VIO Support Hardware USB Dongle (20140-005) oder Service Support Hardware USB (20100-164)

### Installation VIO COPY Tool 2.x

Das aktuelle VIO Copy Tool 2.x finden Sie auf unserer [Webseite](#) unter dem Titel VIO Copy Tool.

Speichern Sie die Zip-Datei lokal auf Ihren Rechner und entpacken Sie das Zip-Archiv.

#### Fall 1: Benutzer, die bisher schon auf Ihrem PC mit VIO Copy 2 gearbeitet haben und die Software neu installieren möchten.

Für die Einbindung neuer VIO D/S Software in das VIO Copy Tool gehen Sie bitte gleich zu dem Abschnitt „Update für neue VIO D/S Software Versionen“.

- Sicherung bestehender (Kunden-) Konfigurationen: Stellen Sie sicher, dass Sie bestehende Konfigurationen gesichert haben, bevor Sie Ihre bestehende Version deinstallieren. Kopieren Sie ggf. das komplette Verzeichnis „Data“ aus ihrer aktuellen Version heraus und speichern diese in Ihrem Backup-Verzeichnis ab. Die Konfigurationen können mit dem neuen VIO Copy 2.x wiederverwendet werden.
- Deinstallation des bisherigen VIO Copy Tools 2
  - Öffnen Sie den Ordner VIO\_COPY\_2.x im Installationspfad, z.B.  
F:\ERBE\VIO\_Tools\VIO\_COPY\_2.x
  - Führen Sie die Datei „uninstall.exe“ aus und folgen Sie den Anweisungen.
  - Bestätigen Sie mit dem Button „Next“
  - Das Programm sowie Desktopverknüpfung und Startmenü-Eintrag werden automatisch entfernt.

#### Fall 2: Benutzer, die auf Ihrem PC / Laptop noch nicht mit VIO COPY TOOL 2.X gearbeitet haben

Für die Installation der Treiber des VIO COPY TOOL 2.X, des XML Parsers und die Einbindung der Programmbibliothek sind Admin-Rechte notwendig!

- Öffnen Sie den heruntergeladenen und entpackten Ordner der Software
- Öffnen Sie die Ordner „Peak“
- Zur Installation des Treibers für die VIO Support Hardware führen Sie die Datei „PcanOemSetup.exe“ aus und folgen den Setup Anweisungen

---

## VIO COPY TOOL 2.X: INSTALLATION UND UPDATE

---

- Zur Installation des XML Parsers, führen Sie die Datei „msxml.msi“ aus, die Sie in dem zuvor entpackten Ordner finden. Danach folgen Sie den Anweisungen und schließen Sie die Installation ab.
- Zur Installation der Programmbibliothek midas, kopieren Sie die Datei „midas.dll“ aus dem selbigen Ordner bei 32 bit-Systemen in den Ordner C:\Windows\System32 bzw. bei 64 bit-Systemen in den Ordner C:\Windows\SysWow64.

### Installation des VIO COPY TOOL 2.X

Wenn Sie die Treiber, den XML Parser installiert und die Programmbibliothek eingebunden haben, können Sie nun die Software auch ohne Administratorrechte installieren.

- Öffnen Sie den Ordner der entpacktet Datei der **VIO COPY TOOL 2.X Software**
- Doppelklicken Sie auf die exe-Datei
- Bestätigen Sie mit dem Button „Next“
- Als Installationspfad wird F:\ERBE\VIO\_Tools\VIO\_COPY\_2.x vorgeschlagen. Bitte verwenden Sie diesen Pfad. Sollten Sie kein Laufwerk F: besitzen, können Sie den Pfad entsprechend abändern (C:\Temp). Bitte beachten Sie, dass eine Installation nach C:\Programme ohne Administrator Rechte nicht möglich ist.
- Bestätigen Sie mit dem Button „Install“.
- Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen. Beenden Sie das Setup-Programm mit „Finish“.
- Das VIO Copy Tool 2.x kann nun verwendet werden. Sie finden sowohl im Startmenü als auch auf dem Desktop eine Programmverknüpfung zum Öffnen des Programmes.

### Update für neue VIO D/S Software Versionen

Steht eine neue VIO D/S Software Version zur Verfügung, muss in Ihr bereits installiertes VIO COPY TOOL 2.x eine neue Konfigurationsdatei (VCPK) geladen werden.

Öffnen Sie die entpackte zip-Datei der **VIO COPY TOOL 2.X Software**

- Wählen Sie „Import Konfig-Dateien“ oder in der Menüleiste „Datei ► Konfigurationsdateien importieren“
- Wählen Sie die Konfigurationsdatei (VCPK) in dem heruntergeladenen Ordner aus.
- Klicken Sie öffnen, um die Konfigurationsdatei zu importieren.

Sie können das Tool nun mit allen VIO D/S Software V 2.x nutzen, da die Konfigurationsdateien immer abwärtskompatibel sind.

### Hilfe-Funktion

Die Software des **VIO COPY TOOL 2.X** verfügt über eine umfassende Hilfefunktion, die über die F1-Taste aufgerufen werden kann. Hier wird die Bedienung der einzelnen Funktionen Schritt für Schritt beschrieben.

### Umfang

Um den vollen Umfang der Software nutzen zu können, aktivieren Sie in dem **VIO COPY TOOL 2.X** den Expertenmodus über die Menüleiste ► Einstellungen.

### Wichtig

Das **VIO COPY TOOL 2.X** ist ausschließlich mit VIO-Geräten der Version 2 oder höher kompatibel. Es ist nicht möglich, Programme der Geräteversion 1.X.X auf ein Gerät mit der Version 2.X.X zu übertragen.

Um eine schnelle Reaktionszeit im Servicefall zu gewährleisten, müssen neu erstellte VIO-Programme an die für Sie zuständige Erbe-Serviceorganisation weitergeleitet werden. Dabei sollte sich die Dateibezeichnung aus folgenden Informationen zusammensetzen:

Artikelnummer\_Seriennummer\_Softwareversion\_Datum\_Standort.Vcxml. z.B. 10140-100\_113009402\_V221\_042010\_Klinikum München RDI. VCXML

Diese Datei senden Sie bitte per E-Mail an [techservice@erbe-med.com](mailto:techservice@erbe-med.com). Hier werden die Programme archiviert und für den Serviceeinsatz bereitgestellt.

### Support

Service-Hotline

Telefon: +49 (0) 7071 755-437

E-Mail: [techservice@erbe-med.com](mailto:techservice@erbe-med.com)